



INSTRUCCIONES DE USO

Estas Instrucciones de uso contienen información sobre cómo inhalar el polvo para inhalación YUTREPIA™ (treprostinil). Lea estas Instrucciones de uso antes de comenzar a usar YUTREPIA y cada vez que solicite producto de recarga a la farmacia bajo su prescripción. Es posible que haya información nueva.

Esta información no reemplaza la conversación con su proveedor de cuidados de la salud sobre su afección médica o tratamiento.

Su proveedor de cuidados de la salud debe mostrarle a usted o a su cuidador cómo usar YUTREPIA de la manera correcta antes de usarlo por primera vez.



Estas Instrucciones de uso contienen información sobre cómo inhalar YUTREPIA. Lea estas Instrucciones de uso antes de comenzar a usar YUTREPIA y cada vez que solicite producto de recarga a la farmacia bajo su prescripción. Es posible que haya información nueva. Esta información no reemplaza la conversación con su proveedor de cuidados de la salud sobre su afección médica o tratamiento. **Su proveedor de cuidados de la salud debe mostrarle a usted o a su cuidador cómo usar YUTREPIA de la manera correcta antes de usarlo por primera vez.**

Información importante que debe conocer antes de inhalar el polvo para inhalación YUTREPIA:

- **No** trague las cápsulas de YUTREPIA. YUTREPIA es solo para inhalación.
- Use YUTREPIA según las indicaciones de su proveedor de cuidados de la salud.
- Las cápsulas de YUTREPIA vienen en 4 concentraciones: 26,5 mcg, 53 mcg, 79,5 mcg y 106 mcg.
- Si su dosis recetada es superior a 106 mcg, deberá inhalar 2 cápsulas de YUTREPIA. **Consulte la Figura C:** tabla de administración de dosis (consulte la página 4) para ayudarlo a identificar las 2 cápsulas necesarias para su dosis recetada. Utilice únicamente las combinaciones de cápsulas de la tabla de dosificación cuando su dosis recetada sea superior a 106 mcg.
- **La cápsula debe inhalarse en los 5 minutos siguientes a la apertura del blíster, de lo contrario no podrá administrarse la dosis completa. Lea esta hoja de instrucciones antes del primer uso de este producto.**

- Siempre inhale cada cápsula 2 veces para asegurarse de recibir la dosis completa de YUTREPIA.
- **No** lave el inhalador. Mantenga el inhalador seco.
- Lávese y séquese las manos antes de usar YUTREPIA.
- Si el contenido de la cápsula entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague el área inmediatamente con agua.
- Las cápsulas de YUTREPIA deben permanecer en el(los) blíster(es) y cada cápsula debe retirarse solo cuando esté lista para administrar una dosis.

Almacenamiento de YUTREPIA

- Almacene la caja de YUTREPIA en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).
- Deje las cápsulas de YUTREPIA en el blíster para protegerlas de la humedad y la luz.
- Deseche el inhalador después de 7 días de uso o 56 cápsulas, lo que ocurra primero.
- **Mantenga YUTREPIA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.**



CONOZCA YUTREPIA

La caja de YUTREPIA contiene (Consulte la Figura A):

- 1 inhalador de polvo seco (denominado “inhalador” en estas instrucciones).
- 7 blísteres en papel de aluminio de cápsulas de YUTREPIA (denominadas “cápsulas” en estas instrucciones) que contienen 4 cápsulas cada uno, en una de las 4 concentraciones disponibles.
- 7 cepillos de limpieza (1 por cada día).
- 1 tableta desecante dentro de cada tira de blíster para mantener la cápsula seca y evitar la humedad. Deseche la tira de blíster y la tableta desecante después de retirar la cápsula.

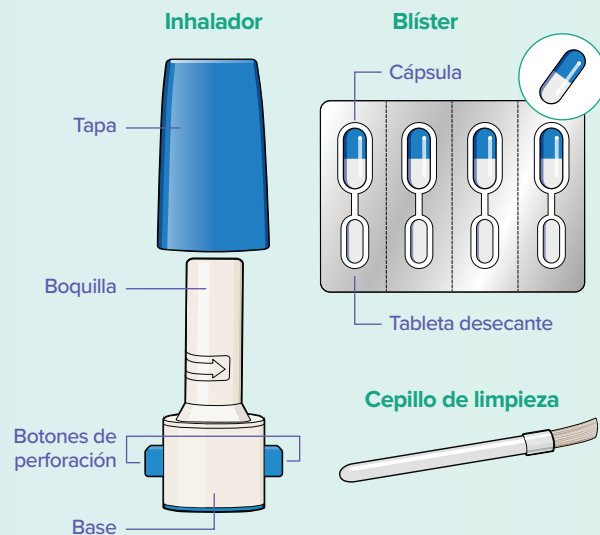


Figura A

PREPARACIÓN PARA USAR YUTREPIA

La cápsula debe inhalarse dentro de los 5 minutos de abierto el blíster. Asegurese de tener todos los suministros a la mano en un solo sitio y que usted esté familiarizado con el uso del producto antes de abrir el blíster.

PASO 1. Reúna sus suministros

- Coloque la caja de YUTREPIA sobre una superficie limpia y seca.
- Retire el inhalador y los blísteres en papel de aluminio de la caja (**consulte la Figura B**).

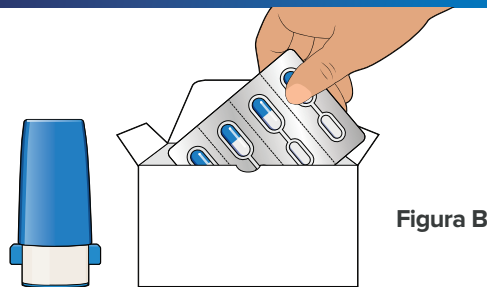


Figura B

Dosis (mcg)	Cápsulas necesarias
26,5	1 amarilla (26,5 mcg)
53	1 verde (53 mcg)
79,5	1 azul (79,5 mcg)
106	1 púrpura (106 mcg)
132,5	1 verde (53 mcg) + 1 azul (79,5 mcg)
159	2 azul (79,5 mcg)
185,5	1 azul (79,5 mcg) + 1 púrpura (106 mcg)
212	2 púrpura (106 mcg)

Figura C

PASO 2. Seleccione la(s) cápsula(s) para su dosis.

Use la tabla de dosificación (**consulte la Figura C**) para identificar las cápsulas necesarias para la dosis recetada.

- Si su dosis recetada es superior a 106 mcg, deberá inhalar 2 cápsulas según la Tabla de administración de dosis (**consulte la Figura C**).
- Cargue e inhale solo 1 cápsula por vez.
- Todas las cápsulas en una caja tienen la misma concentración. Si su dosis recetada requiere 2 cápsulas de diferentes concentraciones, deberá seleccionar las cápsulas de 2 cajas diferentes.

IMPORTANTE: para las dosis que requieran 2 cápsulas, solo use las combinaciones de cápsulas presentadas en el Cuadro de administración de dosis (**consulte la Figura C**). El orden de inhalación de 2 cápsulas no importa, independientemente de la concentración de la cápsula.

PASO 3. Revise el inhalador y el(los) blíster(es).

- Observe el inhalador y el(los) blíster(es) para asegurarse de que no estén dañados (**consulte la Figura D**). No use el inhalador ni las cápsulas si presentan daños.
- Observe la fecha de vencimiento en los blísteres para asegurarse de que no haya pasado (**consulte la Figura E**).

No use las cápsulas si la fecha de vencimiento ha pasado.

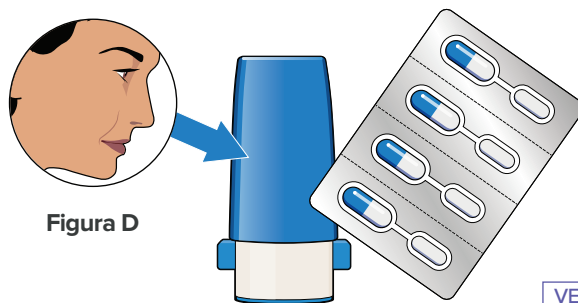


Figura D

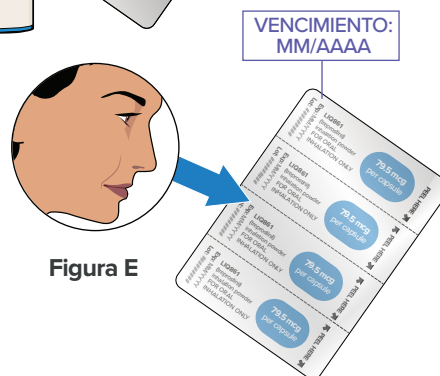


Figura E

CARGAR YUTREPIA

PASO 4. Abra el inhalador.

- Retire la tapa del inhalador (**consulte la Figura F**).
- Gire la boquilla en la dirección de la flecha (en sentido contrario al de las agujas del reloj) para abrir el inhalador y exponer la cámara de la cápsula (**consulte la Figura G**).

Si la boquilla se separa de la base del inhalador, vuelva a unir suavemente las 2 piezas y siga las instrucciones.

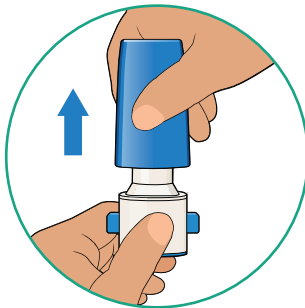


Figura F

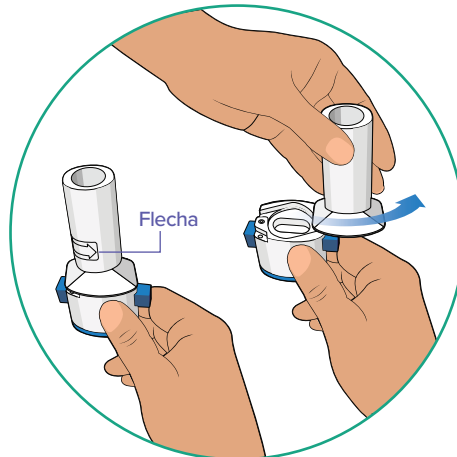


Figura G

PASO 5. Retire la cápsula de la tira de blíster.

- Separe 1 tira de blíster cortando por las líneas precortadas (**consulte la Figura H**).
- Retire el papel de aluminio de la tira de blíster y retire la cápsula (**consulte la Figura I**).

No retire una cápsula de la tira de blíster hasta que esté listo para administrar su dosis.

No trague la cápsula.

No empuje la cápsula a través de la lámina.

No retire la tableta desecante.

La cápsula debe usarse dentro de **5 minutos** luego de haber abierto el blíster.

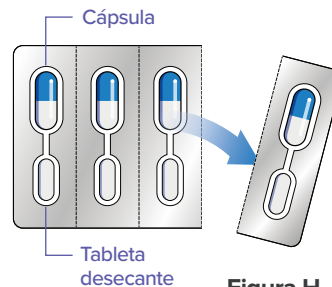


Figura H



Figura I

PASO 6. Asegure la cápsula en el inhalador.

- Sostenga el inhalador en posición vertical.
- Coloque la cápsula en la cámara para cápsulas en la base del inhalador (**consulte la Figura J**). Cargue solo 1 cápsula.

No coloque una cápsula en la boquilla.

No trague las cápsulas.

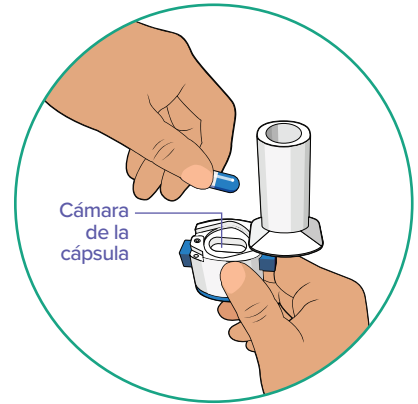


Figura J

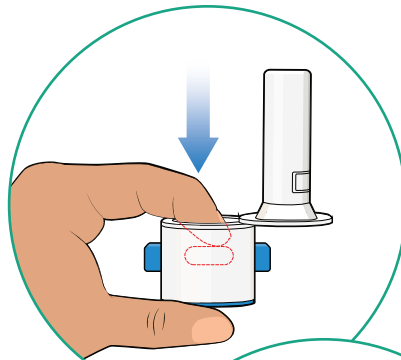


Figura K

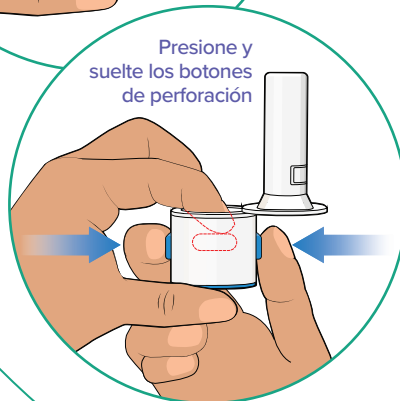


Figura L

PASO 7. Perfore la cápsula.

- Coloque un dedo sobre la cápsula para sostenerla (**consulte la Figura K**).
- Mientras sostiene la cápsula, presione con firmeza ambos botones de perforación hasta el fondo con la otra mano (**consulte la Figura L**).

Luego suelte (libere) los botones de perforación.

Esto perforará la cápsula. Solo necesita presionar los botones de perforación 1 vez.

- Sostenga la base del inhalador y gire la boquilla para cerrarla.

COMO INHALAR YUTREPIA

PASO 8. Coloque el inhalador en posición.

Sostenga el inhalador en posición vertical y lejos de la boca (**consulte la Figura M**).

No sostenga el inhalador por los botones de perforación.



Figura M

PASO 9. Espire (exhale).

Exhale completamente y lejos del inhalador (**consulte la Figura N**).

No exhale en la boquilla.

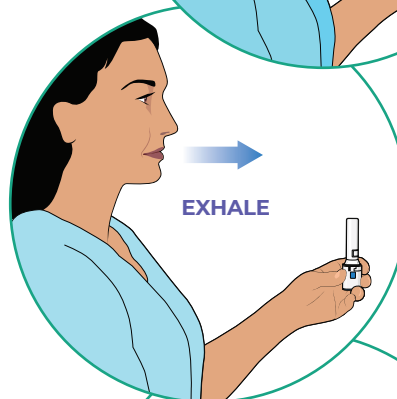


Figura N

PASO 10. Inspire profundamente (inhale).

- Cierre los labios alrededor de la boquilla (**consulte la Figura O**).
- Incline ligeramente la cabeza hacia atrás (**consulte la Figura O**).
- Inspire profundamente (inhale) hasta que los pulmones se sientan llenos (**consulte la Figura O**).
Al inhalar, escuchará o sentirá un zumbido cuando la cápsula gire y libere el medicamento.

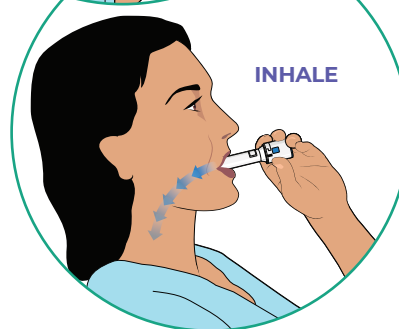


Figura O

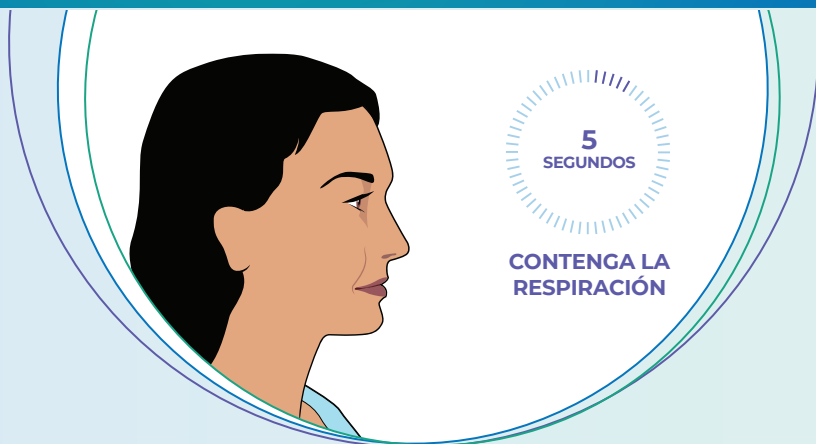


Figura P

PASO 11. Contenga la respiración y luego espire (exhale).

- Retire el inhalador de la boca y contenga la respiración durante 5 segundos o durante el tiempo que pueda (**consulte la Figura P**).
- Luego, exhale normalmente.

IMPORTANTE: Si tose al inhalar, repita los PASOS 8 a 11.

PASO 12. Inhale nuevamente.

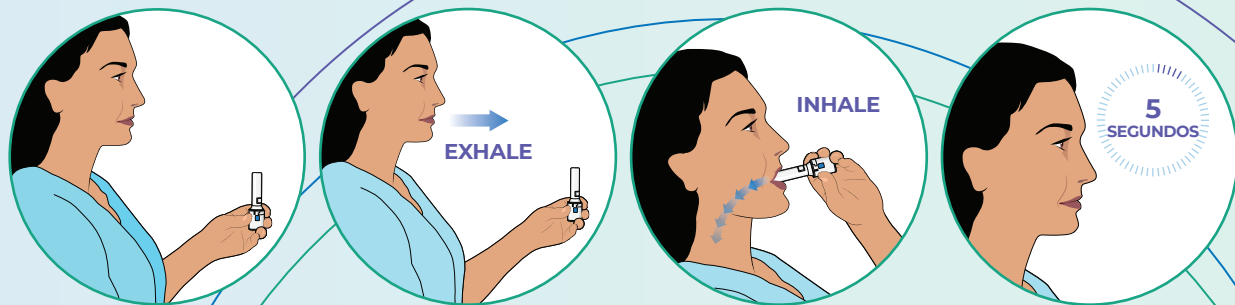


Figura Q

Para asegurarse de que la cápsula esté completamente vacía de medicamento, repita los PASOS 8 a 11 (**consulte la Figura Q**).

Siempre inhale cada cápsula 2 veces para asegurarse de recibir la dosis completa.

EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA CÁPSULA

PASO 13. Abra el inhalador.

- Gire la boquilla en la dirección de la flecha (en sentido contrario al de las agujas del reloj) para abrir el inhalador y exponer la cámara de la cápsula (**consulte la Figura R**).
- Retire la cápsula usada (vacía) y deséchela (tirela) a la basura doméstica (**consulte la Figura S**).
- Consulte la casilla a continuación si necesita usar más de 1 cápsula para completar su dosis recetada.
- Continúe con el PASO 14 si ha completado su dosis recetada.

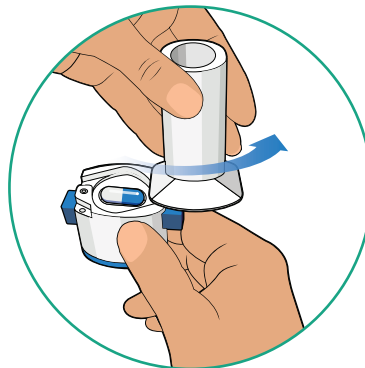


Figura R

Cuando se administra más de 1 cápsula

(para dosis de 132,5 mcg y mayores)



Si necesita usar más de 1 cápsula para completar su dosis recetada, repita los PASOS 4 a 13 con cada cápsula adicional.

El orden de administración de las cápsulas no importa, independientemente de la concentración de las cápsulas.


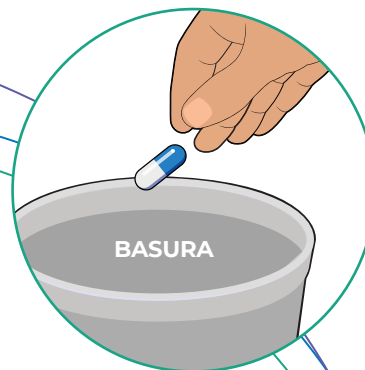


Figura S

CERRAR Y ALMACENAR EL INHALADOR

PASO 14. Cierre el inhalador.

- a. Sostenga la base del inhalador y gire la boquilla para cerrarla (**consulte la Figura T**).
- b. Coloque la tapa en el inhalador (**consulte la Figura U**).
- c. Almacene el inhalador en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente.

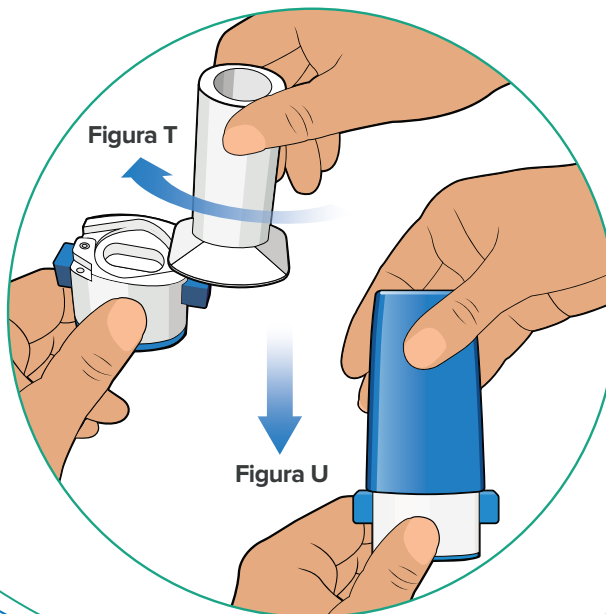

LIMPIEZA DEL INHALADOR (AL FINAL DE CADA DÍA)

Limpie el exterior y el interior del inhalador después de su última dosis del día.

- Limpie la boquilla con una toalla de papel seca, un pañuelo de papel o un paño seco y limpio (vea la Figura V).
- Utilice el cepillo de limpieza proporcionado para limpiar la cámara de la cápsula a fin de eliminar la acumulación de polvo visible (consulte la Figura W).

NOTA: deseche el cepillo después de la limpieza. Use solo 1 cepillo por día.

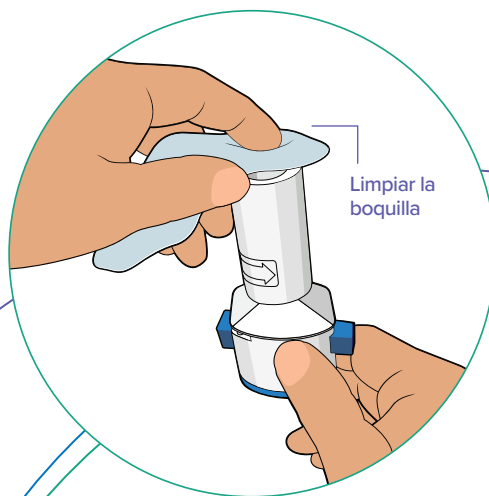


Figura V

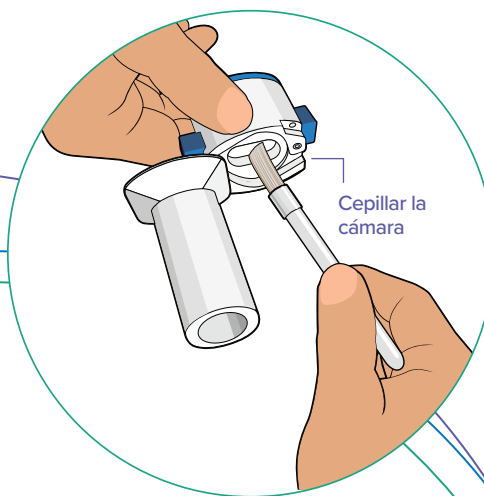


Figura W

COMO DESECHAR EL INHALADOR

Tire (deseche) el inhalador en la basura doméstica después de 7 días de uso.

El inhalador es reutilizable y durará 7 días (1 semana) o 56 cápsulas, lo que ocurra primero **(consulte la Figura X)**.

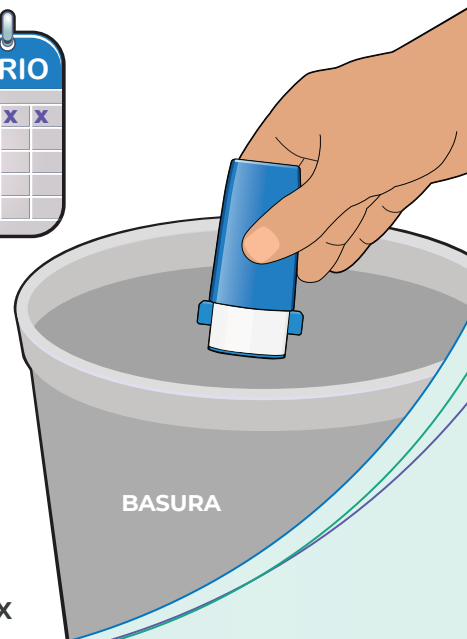


Figura X



Distribuido por: Liquidia Technologies, Inc. Morrisville, NC 27560

Para obtener más información, llame al 1-888-393-5732 o visite www.YUTREPIA.com

Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (EE. UU.).

© 2025 Liquidia Technologies, Inc.

YUTREPIA es una marca comercial de Liquidia Technologies, Inc.

Todos los derechos reservados. US-YUTR-2500023 06-25

